


Instruktion til pillehusker

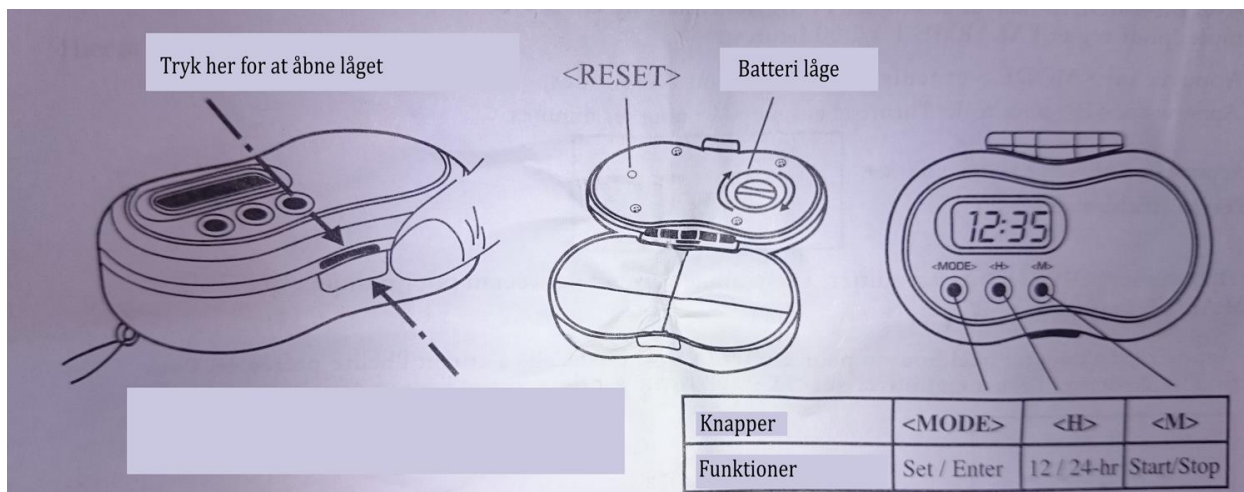

Før brug:

Tryk og åbn låget til pillehuskeren.
Fjern splitten/folien ved batteriet.

Skiftning af batteriet:

Drej og åbn batteri låget.
Sæt herefter et nyt batteri i.

Funktioner:


- A. Tidsvisning - enten 12/24 timers visning
- B. 5 alarmer
- C. Nedtælling (max nedtælling 23 timer og 59 minutter)

HUSKEREGEL

AM (Af Madrassen) = 0.00 - 12.00

PM (På Madrassen) = 12.00 - 24.00

INDSTILLING AF PILLEHUSKEREN

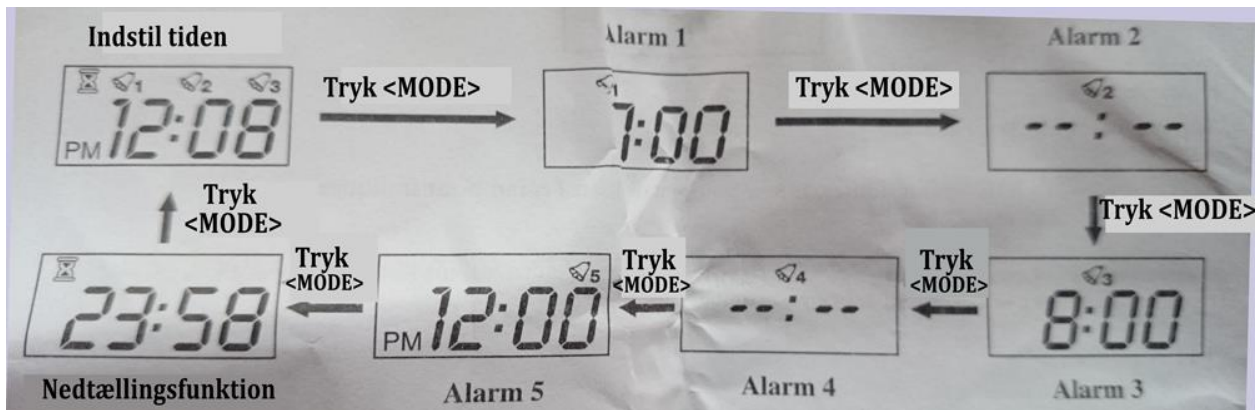

Når du fx trykker <MODE> 1 gang, kommer du til Alarm 1 - og når du 2 gange, kommer du til Alarm 2 osv.

Indstilling af TIDEN (i "Time Mode"):


Tryk <H> for at skifte mellem 12 timer og 24 timers format.

1. Tryk på knappen <MODE> ind og hold den inde 2 sekunder - indtil displayets "timer : minutter" blinker.
2. Tryk <H> for at indstille 'timetallet'. Tryk <M> for at indstille 'minuttallet'.
3. Tryk på knappen <MODE> for at bekræfte og afslutte.

Indstilling af ALARM

Tryk <MODE> for at sætte alarmerne. Fx indstil uret til kl. 07:00 AM i alarm 1.


1. Tryk på knappen <MODE> ind og hold den inde 2 sekunder.
2. Tryk <H> inde til at indstille 'timetallet' og <M> for at indstille 'minuttallet'
3. Tryk på knappen <MODE> for at bekræfte og afslutte. Displayet skulle gerne se sådan her ud:

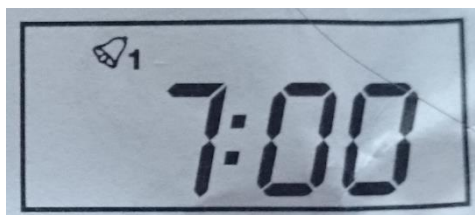

4. Tryk på knappen <MODE> for at forlade alarm indstillingen. Symbolet med klokken og 1 tal indikerer, at ALARM 1 er aktiv (ON)

5. Gentag step 1 - 4 for at sætte ALARM 2, 3, 4 og 5.

Tryk på en hvilken som helst af knapperne for at slukke alarmerne. For at aktivere eller deaktivere alarmerne, tryk <M>. Hvis alarmerne er deaktiveret, så displayet sådan her ud:

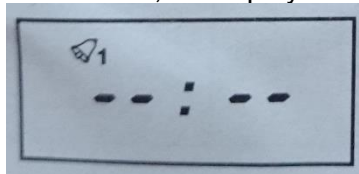


Indstilling af NEDTÆLLING

Sæt fx pillehuskeren til at tælle ned fra 2 timer og 58 minutter.

1. Tryk på knappen <MODE> og hold den inde i 2 sekunder.
2. Tryk <H> for at indstille 'timetallet' og <M> for at indstille 'minuttallet'. Displayet ser sådan her ud:



Hvis displayet viser dette, er den indstillet til 58 minutter:

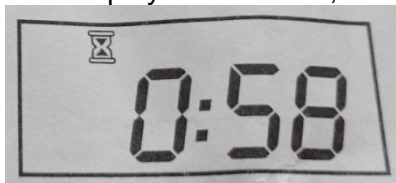

3. Tryk på knappen <MODE> for at bekræfte.
4. Tryk <M> for at sætte nedtællingen i gang.
5. Tryk knappen <MODE> for at forlade displayet. Symbolet med timeglasset er synlig på displayet. Det indikerer at nedtællingen er i gang.

Tryk på en tilfældig knap for at slukke alarmen. For at aktivere eller deaktivere nedtællingen, tryk <M>

ADVARSEL

1. Pillehuskeren virker ikke optimalt i stærke elektrostatiske omgivelser.
2. Brug en spids genstand til at resette pillehuskeren, hvis der opstår fejl efter du har fjernet splitten/folien ved batteriet.
3. Brug pillehuskeren korrekt. Hvis den tabes, udsættes for vand eller ekstreme temperaturer kan det ødelægge pillehuskeren. Inkorrekt brug kan påvirke nøjagtigheden eller ødelægge pillehuskeren.